



Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

για την Ελλάδα:

www.phonak-hellas.com

www.phonak.com



0459

Phonak Bolero Q

Q90, Q70, Q50, Q30

Οδηγίες χρήσης



PHONAK
life is on

Πίνακας περιεχομένων

1. Καλώς ήρθατε	5
2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια: Διαβάστε τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά	6
Προειδοποιήσεις κινδύνου	6
Πληροφορίες ασφάλειας	10
3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας	13
4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας	18
Βήμα 1. Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας	18
Βήμα 2. Προετοιμασία μπαταρίας	21
Βήμα 3. Τοποθέτηση της μπαταρίας	22
Βήμα 4. Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	23
Βήμα 5. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας	24
Βήμα 6. Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί	30
Βήμα 7. Επιλογή του ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί	32
Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας	33

Βήμα 9.	Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	35
Βήμα 10.	Αλλαγή της μπαταρίας	35
Βήμα 11.	Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας M13 με μπαταριοθήκη ασφαλείας	36
5.	Φροντίδα και συντήρηση	38
6.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	42
7.	Ασύρματα αξεσουάρ	44
8.	Επισκευή και εγγύηση	48
9.	Πληροφορίες συμμόρφωσης	50
10.	Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων	53

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα μοντέλα	Σήμανση CE
Phonak Bolero Q90-M312	2012
Phonak Bolero Q90-M13	2012
Phonak Bolero Q90-P	2012
Phonak Bolero Q90-SP	2012
Phonak Bolero Q70-M312	2012
Phonak Bolero Q70-M13	2012
Phonak Bolero Q70-P	2012
Phonak Bolero Q70-SP	2012
Phonak Bolero Q50-M312	2012
Phonak Bolero Q50-M13	2012
Phonak Bolero Q50-P	2012
Phonak Bolero Q50-SP	2012
Phonak Bolero Q30-M312	2013
Phonak Bolero Q30-M13	2013
Phonak Bolero Q30-P	2013
Phonak Bolero Q30-SP	2013

1. Καλώς ήρθατε

Το νέο σας ακουστικό βαρηκοΐας είναι ένα προϊόν υψηλής ελβετικής ποιότητας. Κατασκευάστηκε από την Phonak, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας. Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ακουστικών που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, ώστε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του νέου σας ακουστικού βαρηκοΐας. Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του ακουστικού βαρηκοΐας σας.

Για τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Phonak – life is on

www.phonak.com





2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν προλαμβάνει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να χρειάζεται ακουστική εκπαίδευση και χειλεανάγνωση.

2.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου

 Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη. Τα ακουστικά (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κανέναν άλλο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

-
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων).
 - ⚠ Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!
 - ⚠ Εάν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί ή εάν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος, καθώς και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.
 - ⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην περίπτωση που σφηνώσει η θηλή στον ακουστικό πόρο, συνιστάται να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.
 - ⚠ Τα ακουστικά προγράμματα σε λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου, μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Έχετε υπόψιν σας ότι προειδοποιητικά σήματα ή ήχοι που προέρχονται πίσω από το χρήστη, όπως π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- ⚠ Το ακουστικό βαρηκοΐας περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

- ⚠ Εξωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μόνο εάν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IECXXXXX. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα της Phonak AG.

- ⚠ Το παρακάτω ισχύει μόνο για τα άτομα με ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (βηματοδότες, απινιδωτές, κλπ):
 - Κρατήστε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας τουλάχιστον 15 εκατοστά (6 ίντσες) μακριά από ενεργό εμφύτευμα. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε παρεμβολή, μην χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι παρεμβολές μπορεί επίσης να προκληθούν από γραμμές μεταφοράς ενέργειας, ηλεκτροστατική εκκένωση, ανιχνευτές μετάλλων αεροδρομίου κ.λπ.

-
- Κρατήστε τις συσκευές με ισχυρούς μαγνήτες τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από το ενεργό εμφύτευμα.
 - Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ για τα ακουστικά σας βοηθήματα. Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

2.2 Πληροφορίες ασφαλείας

- ① Τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε κανονικές δραστηριότητες και στην κατά λάθος έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Ποτέ μη βυθίζετε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας στο νερό. Τα βοηθήματα ακοής Phonak δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε νερό ή για δραστηριότητες όπως το κολύμπι ή το μπάνιο. Πάντα να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας πριν από αυτές τις δραστηριότητες καθώς διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- ① Μην πλένετε και μην καθαρίζετε τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.

- ① Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο.) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης, για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις κατάλληλες μεθόδους αφύγρανσης, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθητιστή σας.

-
- ① Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε την μπαταριοθήκη ανοικτή, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλή, στεγνό και καθαρό χώρο.
 - ① Μη πετάτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
 - ① Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούρια για την αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροθετιστή σας.
 - ① Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες silver-zinc ή Li-ion (ιόντων λιθίου), διότι μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 3 εξηγεί ακριβώς το είδος της μπαταρίας που ταιριάζει στο ακουστικό σας σύστημα.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- ① Αφαιρείτε την μπαταρία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ① Ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολία, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ορθή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας σας. Αφαιρέστε τα πριν υποβληθείτε σε εξετάσεις:
 - Ιατρικές και οδοντιατρικές με ακτίνες Χ (επίσης αξονική τομογραφία)
 - Μαγνητική τομογραφία και γενικά όπου υπάρχουν μαγνητικά πεδίαΤα ακουστικά βαρηκοΐας δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (αεροδρόμια κλπ). Αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, η ακτινοβολία είναι μικρή και δεν επηρεάζει την ορθή λειτουργία των ακουστικών.

- ① Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Στις παρακάτω οδηγίες χρήσης περιγράφονται διαφορετικά μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας: Τα ακουστικά βαρηκοΐας **M312**, **M13**, **P** και **SP**.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να προσαρμοστούν με διάφορα εκμαγεία.

Στις παρακάτω σελίδες, χρησιμοποιήστε τα σχέδια με τις επισημάνσεις, για να εντοπίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας και το εκμαγείο που χρησιμοποιείτε.

Στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύεται η μπαταρία που χρειάζεστε ανάλογα με το μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας που διαθέτετε.


Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρος (ένδειξη στη συσκευασία)	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
M312	312 (καφέ)	PR41	7002ZD
M13	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD
P	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD
SP	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας (zinc-air). Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 2.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα P και SP


Επιλογή A: με κλασικό εκμαγείο

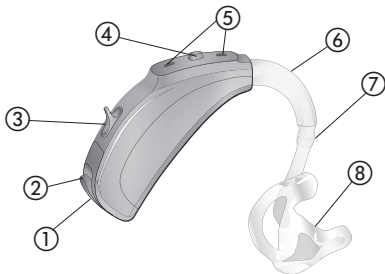


- ① Δείκτης δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί=κόκκινο, αριστερό=μπλε) στην μπαταριοθήκη
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Κουμπί προγραμμάτων
- ⑤ Είσοδοι μικροφώνου
- ⑥ Γωνία/έξοδος ήχου
- ⑦ Ακουστικός σωλήνας
- ⑧ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

Μοντέλα P και SP

Επιλογή Β: με θηλή

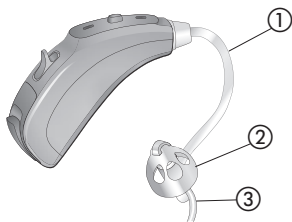

Επιλογή Γ: με SlimTip

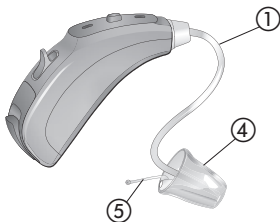


- ① Ακουστικός σωλήνας
- ② Εκμαγείο: Θηλή (αποσπώμενη)
- ③ Κορδόνι συγκράτησης
- ④ Εκμαγείο: SlimTip (αποσπώμενο)
- ⑤ Λαβή αφαίρεσης

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα M312 και M13


Επιλογή Α: με κλασικό εκμαγείο

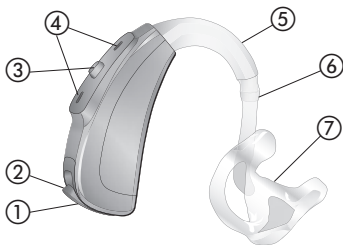


- ① Δείκτης δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί = κόκκινο, αριστερό = μπλε) στην μπαταριοθήκη
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Κουμπί προγραμμάτων ή ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Είσοδοι μικροφώνου
- ⑤ Γωνία/έξοδος ήχου
- ⑥ Ακουστικός σωλήνας
- ⑦ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

Μοντέλα M312 και M13

Επιλογή Β: με θηλή

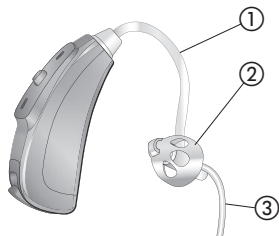

Επιλογή Γ: με SlimTip

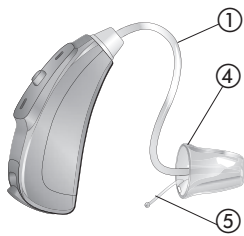

- ① Ακουστικός σωλήνας
- ② Εκμαγείο: Θηλή (αποσπώμενη)
- ③ Κορδόνι συγκράτησης
- ④ Εκμαγείο: SlimTip (αποσπώμενο)
- ⑤ Λαβή αφαίρεσης

4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Στο παρακάτω κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Ακολουθήστε τα βήματα αυτά προσεκτικά.

Βήμα 1. Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και δοκιμάστε τα χειριστήριά του. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και θα τα χρησιμοποιείτε πιο εύκολα αργότερα, όταν φοράτε το ακουστικό βαρηκοΐας.

Μοντέλα P και SP

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω (Εικ. 1α).

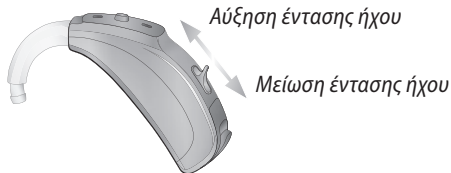

Εικ. 1α

Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται (Εικ. 1β).



Εικ. 1β

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα M312 και M13

Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων*.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας (Εικ. 1γ).

Αριστερό
ακουστικό βαρηκοΐας

Δεξί
ακουστικό βαρηκοΐας

Μείωση έντασης ήχου

Αύξηση έντασης ήχου



Εικ. 1γ

*Για μοντέλα Q30: διαθέσιμος μόνο επιλογέας προγραμμάτων


Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί (Εικ. 1δ).



Εικ. 1δ

Βήμα 2. Προετοιμασία μπαταρίας

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την καινούρια μπαταρία (Εικ. 2). Περιμένετε δύο λεπτά πριν από την τοποθέτηση για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία.

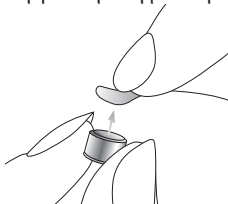

Εικ. 2

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 3. Τοποθέτηση της μπαταρίας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης (Εικ. 3α). Τοποθετήστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 3β).




Εικ. 3α



Εικ. 3β

Βήμα 4. Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 4).

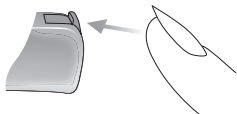

Εικ. 4

- ① **Ανοίξτε και κλείστε απαλά και προσεκτικά την μπαταριοθήκη.**
- ① **Ελέγξτε εάν υπάρχει αντίσταση κατά το κλείσιμο της μπαταριοθήκης. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση και κατεύθυνση. Εάν η μπαταρία τοποθετηθεί με εσφαλμένο τρόπο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και η μπαταριοθήκη μπορεί να υποστεί ζημιά.**

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι πλέον ενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστούν έως και 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. (Όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα).

Βήμα 5. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας. Οι οδηγίες ισχύουν για όλα τα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας. Ο τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας εξαρτάται από τον τύπο του εκμαγείου.

- ① **Κάθε ακουστικό βαρηκοΐας προγραμματίζεται ξεχωριστά για το δεξί ή το αριστερό αυτί. Αρχικά, εντοπίστε το δεξί και το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας, ώστε να το τοποθετήσετε στο σωστό αυτί.**

Βήμα 5.1 Εντοπισμός των ακουστικών βαρηκοΐας
για το δεξί και το αριστερό αυτί


Ένδειξη πλευράς:
δεξί = κόκκινο
αριστερό = μπλε

M312 και SP



Εικ. 5α

M13

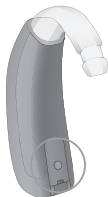


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Βήμα 5.2 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο

Πριν τοποθετήσετε το εκμαγείο, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του βρίσκεται στη σωστή θέση, πάνω από τη γωνία του ακουστικού βαρηκοΐας. Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε το εκμαγείο για το δεξί αυτί (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας, βλ. βήμα 5.1) ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη (*Εικ. 5β*).

Κρατήστε το εκμαγείο κοντά στο αυτί σας (*Εικ. 5δ*). Τοποθετήστε το τμήμα ακουστικού πόρου του εκμαγείου μέσα στον ακουστικό σας πόρο (*Εικ. 5β*). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας (*Εικ. 5γ*). Τοποθετήστε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω τμήμα της κοιλότητας του αυτιού σας (*Εικ. 5δ*).

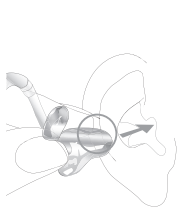

Εικ. 5β

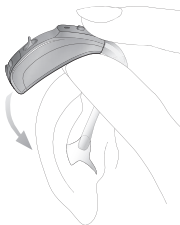

Εικ. 5γ



Εικ. 5δ

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι, για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε το εκμαγείο μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Ελέγξτε την εφαρμογή ψηλαφώντας την κοιλότητα του αυτιού. Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να αισθανθείτε κατά την ψηλάφηση το περίγραμμα της κοιλότητας του αυτιού και όχι του ακουστικού βαρηκοΐας (Εικ. 5ε). Στην αρχή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν καθρέφτη για τον έλεγχο αυτό.



Εικ. 5ε

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 5.3 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή

Πριν τοποθετήσετε τη θηλή, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά προσαρτημένη στο σωλήνα (ο σωλήνας έχει τοποθετηθεί μέχρι τέρμα στη θηλή). Με το δεξί σας χέρι, τοποθετήστε το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας, βλ. βήμα 5.1) πίσω από το δεξί αυτί (*Εικ. 5στ*). Κρατήστε τον ακουστικό σωλήνα ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Εισαγάγετε τη θηλή βαθιά μέσα στον ακουστικό πόρο, ώστε ο ακουστικός σωλήνας να βρίσκεται σε επίπεδη θέση στο αυτί σας (*Εικ. 5ζ*). Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει κορδόνι συγκράτησης, τοποθετήστε το με πίεση στην κοιλότητα του αυτιού, ώστε η θηλή να συγκρατείται στον ακουστικό πόρο (*Εικ. 5η*).



Εικ. 5στ

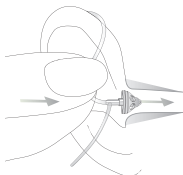

Εικ. 5ζ



Εικ. 5η

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι σας, για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε τη θηλή μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).


Βήμα 5.4 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας με SlimTip

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 5.3, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 6. Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί


Για να αυξήσετε την ένταση ήχου σε ένα μοντέλο **P** ή **SP** (για το μοντέλο **M312** ή **M13**, ανατρέξτε στη σελίδα 29), πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να τη μειώσετε, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω με το δείκτη σας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6α).

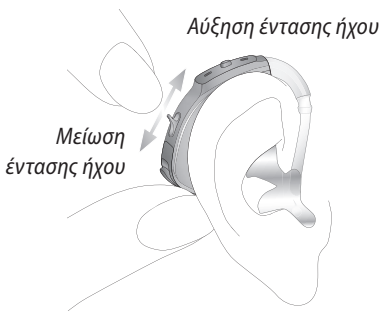

Εικ. 6α

Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων*.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου σε ένα μοντέλο M312 ή M13, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6β).

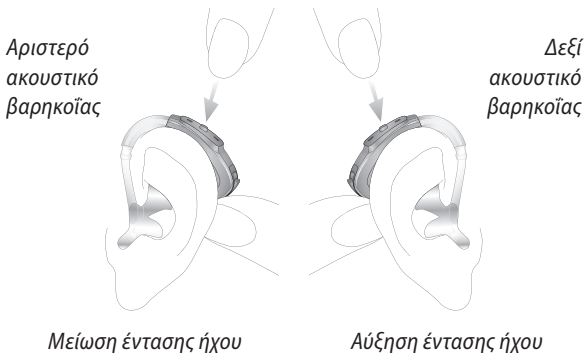

Εικ. 6β

*Για μοντέλα Q30: διαθέσιμος μόνο επιλογέας προγραμμάτων

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 7. Επιλογή του ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί

Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα με ένα ακουστικό βαρηκοΐας **P** ή **SP**, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται (Εικ. 7α). Για ένα ακουστικό βαρηκοΐας **M312** ή **M13**, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται παρακάτω (Εικ. 7β).



Εικ. 7α:
Modely P και SP




Εικ. 7β:
Modely M312 και M13

Εάν πατήσετε ξανά το διακόπτη, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από ένα σήμα. Ο τόνος σήματος θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τα ακουστικά βαρηκοΐας και εάν τα έχετε τοποθετήσει σωστά πίσω από το αυτί.

Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 8.1 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με κλασικό εκμαγείο

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί (μην αγγίζετε το σωλήνα!), ανασηκώστε το πάνω από το άνω τμήμα του αυτιού σας και, στη συνέχεια, αφήστε το προσεκτικά (Εικ. 8α).

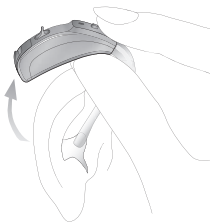

Εικ. 8α

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας, για να κρατήσετε το εκμαγείο στο αυτί σας (όχι το σωλήνα!) και αφαιρέστε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8β).




Εικ. 8β

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 8.2 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με θηλή

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας από τον ακουστικό σωλήνα και αφαιρέστε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8γ).

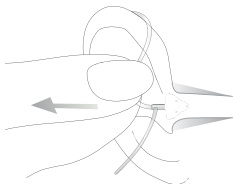

Εικ. 8γ


⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στο κανάλι του αυτιού κατά την αφαίρεση του σωλήνα ακρόασης. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν γιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

Βήμα 8.3 Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας με SlimTip

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 8.2, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη.

Βήμα 9. Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας ανοίγοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 9).

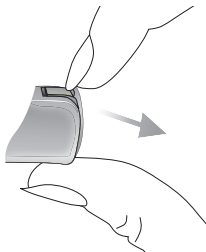

Εικ. 9


Βήμα 10. Αλλαγή της μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας εκπέμπει διπλό χαρακτηριστικό ήχο, για να υποδείξει ότι θα χρειαστεί σύντομα να αλλάξετε την μπαταρία. Συνήθως έχετε στη διάθεσή σας έως 30 λεπτά για να αλλάξετε την μπαταρία, ωστόσο ο χρόνος μπορεί να ποικίλλει και να είναι αρκετά μικρότερος. Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 11. Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας M13 με μπαταριοθήκη ασφαλείας

Στο ακουστικό βαρηκοΐας M13 μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά μπαταριοθήκη ασφαλείας, εάν απαιτείται, για λόγους προστασίας. Τοποθετήστε τη μύτη ενός στυλό μέσα στην εγκοπή που απεικονίζεται (Εικ. 11α). Σπρώξτε τη μπαταριοθήκη προς τα κάτω μέχρι να ανοίξει (Εικ. 11β).

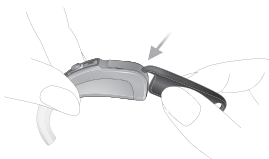


Εικ. 11α

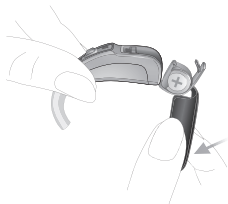


Εικ. 11β


Σπρώξτε την μπαταρία έξω από την μπαταριοθήκη με τη μύτη του στυλό (Εικ. 11γ). Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 11δ). Πριν κλείσετε την μπαταριοθήκη, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία βρίσκεται στη θέση της και κάτω από τη λευκή πλαστική γλωττίδα (Εικ. 11ε).

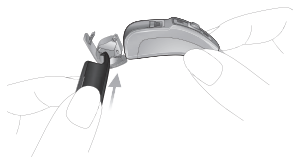


Εικ. 11γ

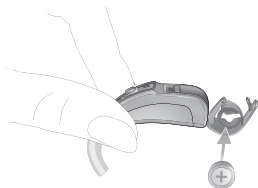

Εικ. 11δ

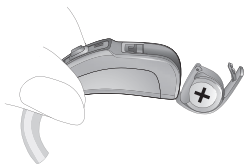

Εικ. 11ε

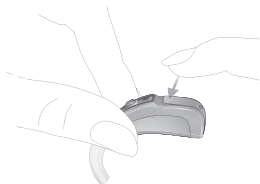

Εικ. 11στ

Κλείστε σωστά την μπαταριοθήκη και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να ανοίξει με το χέρι (Εικ. 11στ).

5. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες:

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, πρέπει να αφαιρέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήστε την μπαταριοθήκη ανοιχτή έτσι ώστε να εξατμιστεί η υγρασία. Να στεγνώνετε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το σε ένα ασφαλές, στεγνό και καθαρό χώρο.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας σας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης πρέπει να είναι εντελώς κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.
 - Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας καθαρίζεται και στεγνώνεται.
 - Το ακουστικό βαρηκοΐας χρησιμοποιείται και συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- ⓘ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με δέκτη Roger/FM ή μπαταριοθήκη ασφαλείας είναι επίσης αδιάβροχα.
- ⓘ Ακουστικά βαρηκοΐας με μπαταριοθήκη η οποία επιτρέπει τη χρήση υποδοχέων ήχου και τη σύνδεση με δέκτες, δεν είναι πλέον αδιάβροχα.

5. Φροντίδα και συντήρηση

- ① Σε περίπτωση χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας στο νερό ενδέχεται να περιορίσει τη ροή αέρα στις μπαταρίες και να πάψει να λειτουργεί. Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στο κεφάλαιο 6.

Καθημερινά

Ελέγχετε εάν υπάρχει κυψελίδα και υγρασία στο εκμαγείο στο εκμαγείο και στο σωλήνα. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Εάν απαιτείται εντατικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Εβδομαδιαία

Καθαρίζετε το εκμαγείο (θηλή ή SlimTip) με μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για οδηγίες ενδεδειγμένης συντήρησης ή καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Μηνιαία

Ελέγχετε εάν ο ακουστικός σωλήνας έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Εάν διαπιστωθούν αλλαγές αυτού του τύπου, ο ακουστικός σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος από τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρότερης έντασης από ό,τι συνήθως / δεν υπάρχει ήχος από τα ακουστικά
Αρχικά, ελέγξτε εάν μπορείτε να ρυθμίσετε και να αυξήσετε την ένταση του ήχου με το ρυθμιστή έντασης ήχου. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο ακουστικό και καθαρίστε τα εξαρτήματα, εάν απαιτείται. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί και εάν εφαρμόζει σωστά. Προσαρμόστε τη θέση της, εάν απαιτείται. Εάν δεν βελτιωθεί ο ήχος, αλλάξτε την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Η μπαταρία αποφορτίζεται υπερβολικά γρήγορα

Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία και σημειώστε τη διάρκεια της με ακρίβεια. Ενημερώστε σχετικά τον ακοοπροθετιστή σας για υποστήριξη και συμβουλές.

Τριγμοί ή βόμβοι

Ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο εκμαγείο. Ελέγξτε εάν έχει υποστεί ζημιά ο ακουστικός σωλήνας (αποχρωματισμός, σκλήρυνση ή ρωγμές) και επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Συριγμοί

Ελέγξτε εάν το εκμαγείο έχει τοποθετηθεί σωστά και εάν εφαρμόζει σταθερά. Εάν το ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλά το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Πόνος ή φλεγμονή στο αυτί

Αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας παύει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό


Στεγνώστε το ακουστικό με ένα μαλακό πανί ή χαρτί. Ανοίξτε την μπαταριοθήκη, αφήστε το ακουστικό βαρηκοΐας να στεγνώσει και αντικαταστήστε την μπαταρία. Εάν έχει παραμείνει νερό στον ακουστικό σωλήνα, αφαιρέστε τον από το ακουστικό βαρηκοΐας χτυπώντας τον ελαφρά για να απομακρύνετε το νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά στο ακουστικό βαρηκοΐας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

7. Ασύρματα αξεσουάρ

Η Rhonak διαθέτει μια σειρά από ασύρματα αξεσουάρ που προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες για τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιπτώσεις όπως τηλεόραση, τηλέφωνο ή απομακρυσμένη επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο.

7.1 Σύνδεση με πηγές ήχου και τηλεχειριστήριο

Η συνδεσιμότητα με πηγή ήχου όπως MP3 player, τηλεόραση ή κινητό τηλέφωνο μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ασύρματα αξεσουάρ μετάδοσης ήχου.

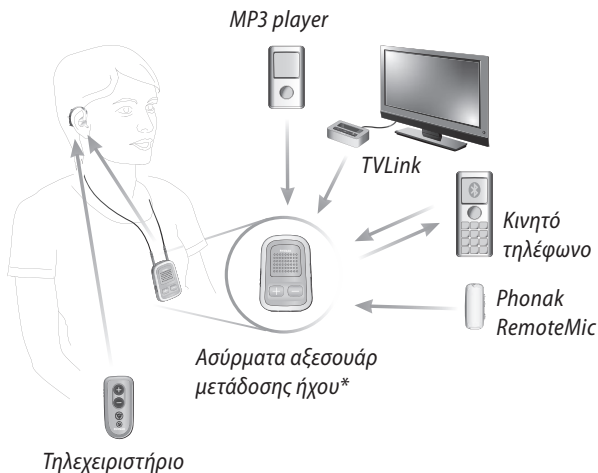

*Οι πηγές ήχου μπορούν να συνδεθούν με Bluetooth® ή καλώδιο σε αξεσουάρ ασύρματης μετάδοσης ήχου

Η ονομασία Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc

7. Ασύρματα αξεσουάρ


7.2 Απομακρυσμένη επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο

Τα αξεσουάρ Roger / FM βοηθούν την επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο και σε απόσταση, στέλνοντας ασύρματα τη φωνή του ομιλητή απευθείας στα ακουστικά σας συστήματα.

Τα Roger / FM περιλαμβάνουν ένα μικρόφωνο και ένα δέκτη. Κάποια μικρόφωνα Roger / FM δέχονται πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

Μικρόφωνο: φοριέται ή τοποθετείται κοντά στον ομιλητή, ή συνδέεται με έξοδο ήχου, μεταδίδοντας απευθείας τον ήχο στον δέκτη χωρίς τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Δέκτης: συνδέεται με τα βοηθήματα ακοής σας και φοριέται πίσω από το αυτί ή επάνω σας με neckloop.

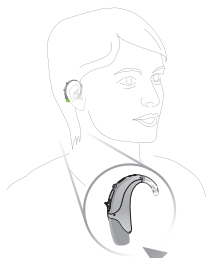

Οπισθοωτιαία
επιλογή δέκτη



Μικρόφωνο*

Επιλογή δέκτη που φοριέται επάνω σας

* Κάποια μικρόφωνα Ρότζερ / FM δέχονται πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

8. Επισκευή και εγγύηση

8.1 Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό βαρηκοΐας που διαθέτετε.

8.2 Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι σε εξαρτήματα όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

8.3 Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολική καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός
(αριστερή πλευρά):

Εξουσιοδοτημένος
ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα / υπογραφή):

Σειριακός αριθμός
(δεξιά πλευρά):

Ημερομηνία αγοράς:

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Rhonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν της Rhonak πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ καθώς και της οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rhonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στη διεύθυνση www.rhonak.com (Rhonak worldwide locations (Αντιπροσωπείες της Rhonak σε ολόκληρο τον κόσμο)).

Αυστραλία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

 N15398

Νέα Ζηλανδία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

Z1285

Τα ασύρματα μοντέλα που εμφανίζονται στο κεφάλαιο 1, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με:

	Μοντέλα M312	Μοντέλα M13
Αμερική	FCC ID: KWC-WHSSAN1	KWC-WHSSANQ
Καναδάς	IC: 2262A-WHSSAN1	2262A-WHSSANQ

	Μοντέλα P και SP
Αμερική	FCC ID: KWC-WHSBTE1
Καναδάς	IC: 2262A-WHSBTE1

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτοί πληροί τους κανονισμούς της FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

- 1) η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει καμία επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και
- 2) η συσκευή αυτή θα πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε εισερχόμενη παρεμβολή συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παρεμβολής που πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της.

Σημείωση 2:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις της συσκευής που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Rhonak μπορούν να ακυρώσουν την άδεια της FCC για ορθή λειτουργία της συσκευής.

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια για ψηφιακή συσκευή τάξης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν η συσκευή αυτή δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια δεδομένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας και κατόπιν και πάλι σε λειτουργία, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από το κύκλωμα στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή κάποιον πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak – συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων – πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ, καθώς και της οδηγίας R&TTE 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Δηλώνει τον ιατρικό κατασκευαστή συσκευής, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 / ΕΟΚ.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ
και ραδιοεπικοινωνιών, Αυστραλία.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό για τον χρήστη να διαβάσει και να λάβει υπόψιν του τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια των προϊόντων

Συνθήκες λειτουργίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Θερμοκρασία: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου
(-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ)



Υγρασία κατά τη μεταφορά:
Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία
κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%,
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες
σχετικά με το στέγνωμα του ακουστικού
βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο
κεφάλαιο 2.2.



Ατμοσφαιρική πίεση:
200 hPa έως 1500 hPa



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο
απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό
το ακουστικό βαρηκοΐας δεν πρέπει
να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά
απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμο-
ποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει
να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης
ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδο-
νται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη.
Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και της υγείας.
