

# Phonak Tao Q

Q15, Q10

Οδηγίες χρήσης



**PHONAK**  
life is on

---

# Πίνακας περιεχομένων

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Καλώς ήρθατε</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια</b>                                   | <b>6</b>  |
| Διαβάστε τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας για πρώτη φορά | 6         |
| Προειδοποιήσεις κινδύνου  | 6         |
| Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος  | 9         |
| <b>3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας</b>  | <b>12</b> |
| <b>4. Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας</b>                 | <b>15</b> |
| <b>Βήμα 1:</b> Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας                             | 15        |
| <b>Βήμα 2:</b> Προετοιμασία μπαταρίας   | 18        |
| <b>Βήμα 3:</b> Τοποθέτηση μπαταρίας   | 18        |
| <b>Βήμα 4:</b> Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας                                | 19        |
| <b>Βήμα 5:</b> Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας                                  | 20        |
| <b>Βήμα 6:</b> Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου μέσα στο αυτί                   | 22        |
| <b>Βήμα 7:</b> Επιλογή προγράμματος μέσα στο αυτί                                   | 23        |
| <b>Βήμα 8:</b> Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας                                    | 24        |

---

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>Βήμα 9:</b>  | <b>Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας</b> | <b>26</b> |
| <b>Βήμα 10:</b> | <b>Αλλαγή της μπαταρίας</b>                    | <b>26</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Φροντίδα και συντήρηση</b>                  | <b>27</b> |
| <b>6.</b>       | <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                | <b>30</b> |
| <b>7.</b>       | <b>Ασύρματα αξεσουάρ</b>                       | <b>32</b> |
| <b>8.</b>       | <b>Επισκευή και εγγύηση</b>                    | <b>34</b> |
| <b>9.</b>       | <b>Πληροφορίες συμμόρφωσης</b>                 | <b>36</b> |
| <b>10.</b>      | <b>Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων</b>      | <b>37</b> |

---

**Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:**

| <b>Ενσύρματα μοντέλα</b> | <b>Σήμανση CE</b> |
|--------------------------|-------------------|
| Phonak Tao Q15-10 NW O   | 2013              |
| Phonak Tao Q15-312 NW    | 2013              |
| Phonak Tao Q15-13 NW     | 2013              |
| Phonak Tao Q10-10 NW O   | 2013              |
| Phonak Tao Q10-312 NW O  | 2013              |
| Phonak Tao Q10-13 NW     | 2013              |

---

# 1. Καλώς ήρθατε

Το νέο σας ακουστικό βαρηκοΐας είναι ένα προϊόν υψηλής ελβετικής ποιότητας. Κατασκευάστηκε από την Phonak, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας. Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ακουστικών που διατίθεται αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με το καινούργιο σας ακουστικό σύστημα. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά, προκειμένου να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που μπορούν τα νέα σας βοηθήματα να σας προσφέρουν. Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, θα είστε σε θέση να απολαύσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πολλά χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

**Phonak – life is on**

**[www.phonak.com](http://www.phonak.com)**



0459


---


## 2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

**Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.**

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν προλαμβάνει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να χρειάζεται ακουστική εκπαίδευση και χειλανάγνωση.

### 2.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου



 Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη. Τα ακουστικά (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κανέναν άλλο καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

- 
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων).
  - ⚠ Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!
  - ⚠ Εάν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί ή εάν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος, καθώς και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.
  - ⚠ Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι προειδοποιητικά σήματα ή ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή εν μέρει.
  - ⚠ Το ακουστικό βαρηκοΐας περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

---

## 2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

-  Εξωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μόνο εάν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IECXXXXX. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα της Phonak AG.
-  Το παρακάτω ισχύει μόνο για τα άτομα με ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (απινιδωτές, κλπ):
- Κρατήστε τις συσκευές με ισχυρούς μαγνήτες τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από το ενεργό εμφύτευμα.
  - Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ για τα ακουστικά σας βοηθήματα. Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.



---

## 2.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ❶ Μη βάζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό! Προστατεύετε το ακουστικό από την υπερβολική υγρασία. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από ντους, μπάνιο ή κολύμβηση, καθώς το ακουστικό περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ❶ Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης, για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις κατάλληλες μεθόδους αφύγρανσης, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❶ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε την μπαταριοθήκη ανοικτή, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλή, στεγνό και καθαρό χώρο.
- ❶ Μη πετάτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

---

## 2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- ❶ Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούρια για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροθετιστή σας.
- ❶ Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 1,5 Volt. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες silver-zinc ή Li-ion (ιόντων λιθίου), διότι μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ο πίνακας στο κεφάλαιο 3 εξηγεί ακριβώς το είδος της μπαταρίας που ταιριάζει στο ακουστικό σας σύστημα.
- ❶ Αφαιρείτε την μπαταρία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ❶ Ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολία, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ορθή λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας σας. Αφαιρέστε τα πριν υποβληθείτε σε εξετάσεις:

- 
- Ιατρικές και οδοντιατρικές με ακτίνες Χ (επίσης αξονική τομογραφία)
  - Μαγνητική τομογραφία και γενικά όπου υπάρχουν μαγνητικά πεδία

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (αεροδρόμια κλπ). Αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, είναι σε πολύ χαμηλές δόσεις, και δεν επηρεάζουν την ορθή λειτουργία των ακουστικών.

- ① Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

---

### 3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Στις παρακάτω οδηγίες χρήσης περιγράφονται διαφορετικά μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας. Χρησιμοποιήστε τα σχέδια με τις επισημάνσεις, για να εντοπίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας που χρησιμοποιείτε.

**Σημείωση:** ορισμένες ειδικές λειτουργίες που περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο μοντέλο σας, καθώς κάποια χαρακτηριστικά είναι προαιρετικά ή διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα.


Στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύεται η μπαταρία που χρειάζεστε ανάλογα με το μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας που διαθέτετε.

| Μοντέλο | Μέγεθος μπαταρίας<br>ψευδαργύρου αέρος<br>(ένδειξη στη συσκευασία) | IEC<br>κωδικός | ANSI<br>κωδικός |
|---------|--|----------------|-----------------|
| Q-10    | 10A (κίτρινο)  | PR70           | 7005ZD          |
| Q-312   | 312 (καφέ)   | PR41           | 7002ZD          |
| Q-13    | 13 (πορτοκαλί)   | PR48           | 7000ZD          |

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο μπαταρίας (zinc-air). Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 2.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

---

## Μοντέλα Tao Q-10

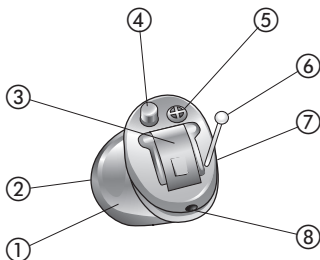


- ① Κέλυφος κατά παραγγελία
- ② Μεγάφωνο (έξοδος ήχου) και σύστημα προστασίας από την κυψελίδα
- ③ Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ④ Κουμπί προγραμμάτων (προαιρετικό)\*
- ⑤ Προστατευόμενη είσοδος μικροφώνου
- ⑥ Άκρο αφαίρεσης
- ⑦ Ένδειξη δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί = κόκκινο, αριστερό = μπλε)
- ⑧ Αερισμός

\* Ο ρυθμιστής έντασης ήχου είναι επίσης προαιρετικός, δείτε σελίδα 14.

### 3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

#### Μοντέλα Ταο Q-312 και Q-13

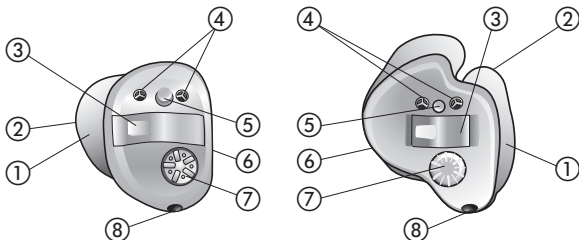

- ① Κέλυφος κατά παραγγελία
- ② Μεγάφωνο (έξοδος ήχου) και σύστημα προστασίας από την κυψελίδα
- ③ Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- ④ Προστατευόμενες είσοδοι μικροφώνων
- ⑤ Κουμπί προγραμμάτων ((προαιρετικό))
- ⑥ Ένδειξη δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί = κόκκινο, αριστερό = μπλε)
- ⑦ Ρυθμιστής έντασης ήχου ((προαιρετικό))
- ⑧ Αερισμός

---

## 4. Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο παρακάτω κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Ακολουθήστε τα βήματα αυτά προσεκτικά. Στα σχήματα, τα εξαρτήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κάθε βήμα υποδεικνύονται με πράσινο χρώμα.

### **Βήμα 1:** Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και δοκιμάστε τα χειριστήριά του, εφόσον διαθέτει. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και θα τα χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα αργότερα, όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.

---

#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας



Περιστρέψτε τον ρυθμιστή έντασης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου (Εικ. 1α).

Αριστερό αυτί

Δεξί αυτί

Μεγαλύτερη  
ένταση

Μεγαλύτερη  
ένταση

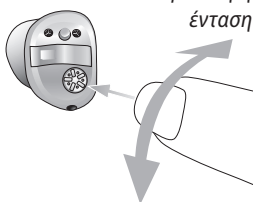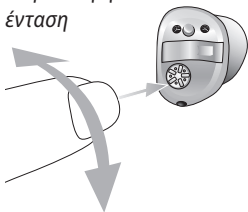

Μικρότερη ένταση

Μικρότερη ένταση


Εικ. 1α

Η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να περιστρέψετε το ρυθμιστή έντασης ήχου, όταν φοράτε το ακουστικό βαρηκοΐας μέσα στο αυτί, παρουσιάζεται στο βήμα 6 της ενότητας αυτής.



---

Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα ή την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί (Εικ. 1β).

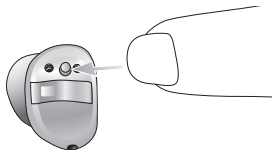


Εικ. 1β

---

#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

##### **Βήμα 2:** Προετοιμασία μπαταρίας


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την καινούρια μπαταρία (Εικ. 2). Περιμένετε δύο λεπτά πριν από την τοποθέτηση για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία.

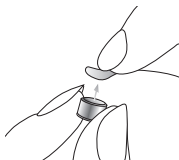

Εικ. 2

##### **Βήμα 3:** Τοποθέτηση μπαταρίας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας (Εικ. 3α) και ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης. Τοποθετήστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 3β).

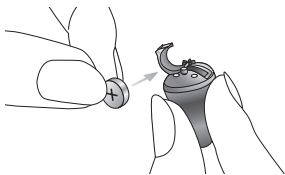

Εικ. 3α



Εικ. 3β

---

#### **Βήμα 4:** Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 4).



Εικ. 4

- ① **Να ανοίγετε και να κλείνετε την μπαταριοθήκη απαλά και προσεκτικά.**
- ① **Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά το κλείσιμο της μπαταριοθήκης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση και κατεύθυνση. Εάν η μπαταρία τοποθετηθεί με εσφαλμένο τρόπο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και η μπαταριοθήκη μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι πλέον ενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. (Όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα).

---

#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

##### **Βήμα 5:** Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας.

- i** Κάθε ακουστικό βαρηκοΐας προγραμματίζεται ξεχωριστά για το δεξί ή το αριστερό αυτί. Αρχικά, εντοπίστε το δεξί και το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας, ώστε να το τοποθετήσετε στο σωστό αυτί.

##### **Βήμα 5.1** Εντοπισμός των ακουστικών βαρηκοΐας για το δεξί και το αριστερό αυτί

Η χρωματική ένδειξη βρίσκεται στο κέλυφος (το φίλτρο είναι κόκκινο ή μπλε):

δεξί = κόκκινο

αριστερό = μπλε




Εικ. 5α

---

## Βήμα 5.2 Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας (ισχύει για όλα τα μοντέλα)

Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας για το δεξί αυτί (Εικ. 5β) ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Για τα μοντέλα Ταο Q-10 το άκρο αφαίρεσης θα πρέπει να είναι στραμμένο προς το κάτω μέρος του αυτιού.

Τοποθετήστε το άκρο του ακουστικού βαρηκοΐας μέσα στον ακουστικό πόρο (βλ. τμήμα εντός κύκλου με πράσινο χρώμα στην εικ. 5β). Τραβήξτε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας και πιέστε το ακουστικό βαρηκοΐας, ώστε να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια. Στην αρχή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν καθρέφτη για τον έλεγχο αυτό.

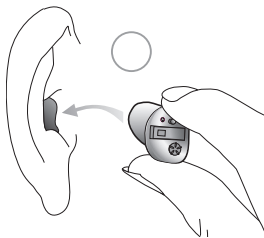

Εικ. 5β

#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1)

#### **Βήμα 6:** Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου μέσα στο αυτί

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου (μόνο τα μοντέλα που διαθέτουν ρυθμιστή έντασης ήχου), περιστρέψτε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα εμπρός. Για να τη μειώσετε, περιστρέψτε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πίσω με το δείκτη σας (Εικ. 6α).


Αριστερό αυτί

Μεγαλύτερη ένταση

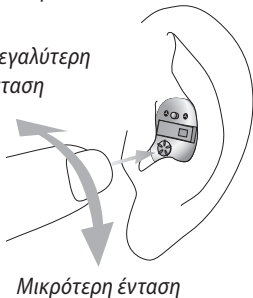

Δεξί αυτί

Μεγαλύτερη ένταση

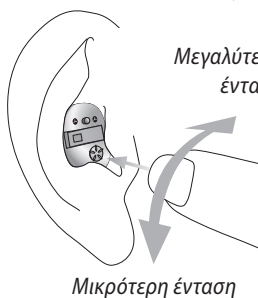


Εικ. 6α

---

## **Βήμα 7:** Επιλογή του προγράμματος μέσα στο αυτί

Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα (μόνο τα μοντέλα που διαθέτουν κουμπί προγραμμάτων), πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται παρακάτω (Εικ. 7).

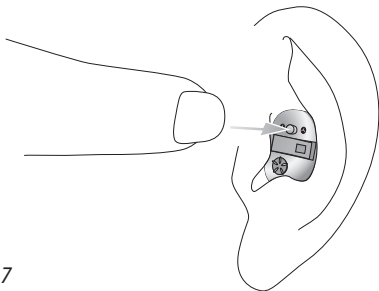

*Εικ. 7*

Εάν το πατήσετε ξανά, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από μία ηχητική ένδειξη.

Το ηχητικό σήμα θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας και εάν το έχετε τοποθετήσει σωστά μέσα στο αυτί.

---


#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

##### **Βήμα 8:** Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στα παρακάτω βήματα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας με ή χωρίς άκρο αφαίρεσης.

##### **Βήμα 8.1** Αφαίρεση ακουστικού με άκρο αφαίρεσης


Κρατήστε τη λαβή αφαίρεσης ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη, τραβήξτε προσεκτικά προς τα πάνω το ακουστικό βαρηκοΐας και αφαιρέστε το από το αυτί (*Εικ. 8α*).

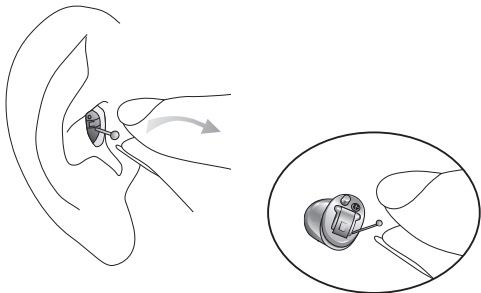

*Εικ. 8α*




## Βήμα 8.2 Αφαίρεση ακουστικού χωρίς άκρο αφαίρεσης

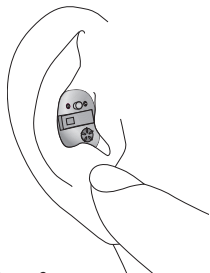

Εικ. 8β

Τοποθετήστε τον αντίχειρα πίσω από το λοβό (ακριβώς πίσω από το σκληρό χόνδρο, Εικ. 8β) και πιέστε προσεκτικά προς τα πάνω το αυτί σας, για να αφαιρέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τον πόρο. Για να διευκολυνθεί η αφαίρεση, μπορείτε να κάνετε κινήσεις με το σαγόني σας, να μασάτε.

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας που προεξέχει και αφαιρέστε το (Εικ. 8γ).

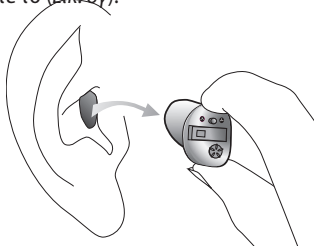


Εικ. 8γ

---

#### 4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

##### **Βήμα 9:** Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας ανοίγοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 9).

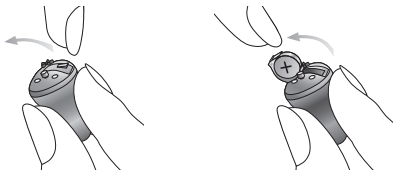

Εικ. 9

##### **Βήμα 10:** Αλλαγή της μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας εκπέμπει διπλό χαρακτηριστικό ήχο, για να υποδείξει ότι θα χρειαστεί σύντομα να αλλάξετε την μπαταρία. Συνήθως έχετε στη διάθεσή σας έως 30 λεπτά για να αλλάξετε την μπαταρία, ωστόσο ο χρόνος μπορεί να ποικίλλει και να είναι σημαντικά λιγότερος. Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.

---

## 5. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες:

### **Γενικές πληροφορίες**

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά μπορεί να του προκαλέσουν ζημιά.

---

## 5. Φροντίδα και συντήρηση

### **Καθημερινά**

Συνιστάται ιδιαίτερα ο καθημερινός καθαρισμός και η χρήση ενός συστήματος αφύγρανσης. Ο ακοοπροθετιστής σας θα σας ενημερώσει σχετικά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα οικιακής χρήσης (απορρυπαντικό σε σκόνη, σαπούνι, κ.λπ.) για τον καθαρισμό των ακουστικών βαρηκοΐας σας.

Εάν η λειτουργία του ακουστικού βαρηκοΐας δεν είναι ικανοποιητική ή εάν το ακουστικό δεν λειτουργεί, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σύστημα προστασίας από την κυψελίδα. Εάν μετά από σωστό καθαρισμό ή αντικατάσταση του συστήματος προστασίας από την κυψελίδα και την τοποθέτηση καινούριων μπαταριών, το ακουστικό βαρηκοΐας σας δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για υποστήριξη.

### **Εβδομαδιαία**


Για οδηγίες ενδελεχούς συντήρησης ή καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

---

## Προστασία από την κυψελίδα

Το SmartGuard είναι ένα μοναδικό σύστημα προστασίας από κυψελίδα που αναπτύχθηκε από την Phonak. Ο μοναδικός σχεδιασμός της μεμβράνης προστατεύει πλήρως το ακουστικό βαρηκοΐας σας από το κερύ και την υγρασία.

### *SmartGuard*

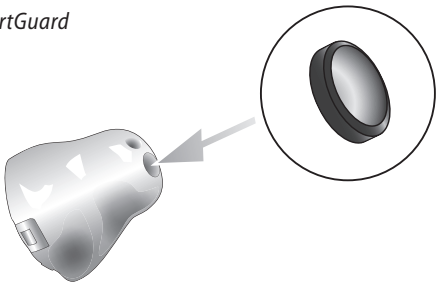

Το σύστημα Cerustor χρησιμοποιείται επιπλέον ως εναλλακτική λύση προστασίας. Απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του συστήματος προστασίας από κυψελίδα στο ακουστικό βαρηκοΐας.

**Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.**

---

## 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Ο ήχος από τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρότερης έντασης από ό,τι συνήθως / δεν υπάρχει ήχος από τα ακουστικά**

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σύστημα προστασίας από την κυψελίδα. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί και εφαρμόζει σωστά. Προσαρμόστε τη θέση της, εάν απαιτείται. Εάν δεν βελτιωθεί ο ήχος, αλλάξτε την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

**Η μπαταρία αποφορτίζεται υπερβολικά γρήγορα**

Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία και σημειώστε τη διάρκεια της με ακρίβεια. Ενημερώστε σχετικά τον ακοοπροθετιστή σας για υποστήριξη και συμβουλές.

**Τριγμοί ή βόμβος**

Ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να τοποθετήσετε μια καινούρια μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

---

## **Συριγμοί**

Ελέγξτε εάν το ακουστικό βαρηκοΐας έχει τοποθετηθεί σωστά και εάν εφαρμόζει σταθερά. Εάν το ακουστικό έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλά το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

## **Πόνος ή φλεγμονή στο αυτί**

Αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

---

## 7. Ασύρματα αξεσουάρ

Η Rhonak διαθέτει μια σειρά από ασύρματα αξεσουάρ που προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες για τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιπτώσεις όπως τηλεόραση, τηλέφωνο ή απομακρυσμένη επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο (διατίθεται μόνο για τα μοντέλα Tao Q15 με telecoil).

### **Απομακρυσμένη επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο**


Τα αξεσουάρ Roger / FM βοηθούν την επικοινωνία σε χώρους με θόρυβο και σε απόσταση, στέλνοντας ασύρματα τη φωνή του ομιλητή απευθείας στα ακουστικά σας συστήματα.

Τα Roger / FM περιλαμβάνουν ένα μικρόφωνο και ένα δέκτη. Κάποια μικρόφωνα Roger / FM δέχονται πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

**Μικρόφωνο:** φοριέται ή τοποθετείται κοντά στον ομιλητή, ή συνδέεται με έξοδο ήχου, μεταδίδοντας απευθείας τον ήχο στον δέκτη χωρίς τους θορύβους του περιβάλλοντος.

**Δέκτης:** συνδέεται με τα βοηθήματα ακοής σας και φοριέται πίσω από το αυτί ή επάνω σας με neckloop.



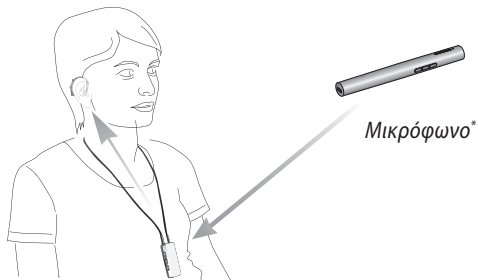

*Επιλογή δέκτη που φοριέται επάνω σας*

\* Κάποια μικρόφωνα Ρότζερ / FM δέχονται πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

---

## 8. Επισκευή και εγγύηση

### 8.1 Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό βαρηκοΐας που διαθέτετε.

### 8.2 Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι σε εξαρτήματα όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

---

### 8.3 Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολική καταπόνηση. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός  
(αριστερή πλευρά):

Εξουσιοδοτημένος  
ακοοπροθετιστής  
(σφραγίδα / υπογραφή):

---

Σειριακός αριθμός  
(δεξιά πλευρά):

---

Ημερομηνία αγοράς:

---

---

## 9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

### Δήλωση συμμόρφωσης

Η Rhonak AG δηλώνει δια του παρόντος ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rhonak, τη διεύθυνση του οποίου μπορείτε να βρείτε στο [www.rhonak.com](http://www.rhonak.com)

---

Αυστραλία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

 N15398

---

Νέα Ζηλανδία:

Κωδικός Αριθμός Προμηθευτή

Z1285

---

---

## 10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak – συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων – πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ, καθώς και της οδηγίας R&TTE 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Δηλώνει τον ιατρικό κατασκευαστή συσκευής, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 / ΕΟΚ.

---

---

## 10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ  
και ραδιοεπικοινωνιών, Αυστραλία.

---



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό για τον χρήστη να διαβάσει και να λάβει υπόψιν του τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

---



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

---



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια των προϊόντων

---

### **Συνθήκες λειτουργίας**

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

---



Θερμοκρασία:  $-20^{\circ}$  έως  $+60^{\circ}$  Κελσίου  
( $-4^{\circ}$  έως  $+140^{\circ}$  Φαρενάιτ)

---



Υγρασία κατά τη μεταφορά:  
Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία  
κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%,  
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες  
σχετικά με το στέγνωμα του ακουστικού  
βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο  
κεφάλαιο 2.2.

---



Ατμοσφαιρική πίεση:  
200 hPa έως 1500 hPa

---



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

---



**Phonak AG**

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

