

Phonak Sky Q

Q90, Q70, Q50

Οδηγίες Χρήσης



PHONAK
life is on

Πίνακας περιεχομένων

1. Καλώς ήρθατε	5
2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια: Διαβάστε τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά	6
Προειδοποιήσεις κινδύνου	6
Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος	10
3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας	13
4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας	19
Βήμα 1. Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας	19
Βήμα 2. Προετοιμασία μπαταρίας	22
Βήμα 3. Τοποθέτηση μπαταρίας	23
Βήμα 4. Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	24
Βήμα 5. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας	25
Βήμα 6. Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί	31
Βήμα 7. Επιλογή του ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί	33

Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας	35
Βήμα 9. Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας	37
Βήμα 10. Αλλαγή της μπαταρίας	38
Βήμα 11. Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας UltraPower ή SuperPower με μπαταριοθήκη ασφαλείας	39
Βήμα 12. Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας M13 ή RIC με μπαταριοθήκη ασφαλείας	44
5. Φροντίδα και συντήρηση	46
6. Αντιμετώπιση προβλημάτων	50
7. Περιγραφή ασύρματων εξαρτημάτων	52
8. Σέρβις και εγγύηση	62
9. Πληροφορίες συμμόρφωσης	64
10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων	67

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματα μοντέλα

Phonak Sky Q90-UP

Phonak Sky Q90-SP

Phonak Sky Q90-M13

Phonak Sky Q90-RIC

Phonak Sky Q70-UP

Phonak Sky Q70-SP

Phonak Sky Q70-M13

Phonak Sky Q70-RIC

Phonak Sky Q50-UP

Phonak Sky Q50-SP

Phonak Sky Q50-M13

Phonak Sky Q50-RIC

1. Καλώς ήρθατε

Το νέο σας ακουστικό βαρηκοΐας είναι ένα προϊόν υψηλής ελβετικής ποιότητας. Κατασκευάστηκε από την Phonak, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας. Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ακουστικών που διατίθεται αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, ώστε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του νέου σας ακουστικού βαρηκοΐας. Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του ακουστικού βαρηκοΐας σας.

Για τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή σας.

Phonak - life is on

www.phonak.com



2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.

2.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου

⚠ Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη. Τα ακουστικά βαρηκοΐας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

-
- ⚠ Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Phonak. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
 - ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων).
 - ⚠ Οι μπαταρίες του ακουστικού βαρηκοΐας είναι τοξικές σε περίπτωση κατάποσης! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης των μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό!
 - ⚠ Για την αποφυγή ακούσιας κατάποσης της μπαταρίας ή εξαρτημάτων μικρού μεγέθους της συσκευής, σε περίπτωση χρήσης από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 36 μηνών, απαιτείται η χρήση διατάξεων προφύλαξης από παρεμβάσεις για το καπάκι της μπαταριοθήκης, το άγκιστρο για το αυτί και τον ενσωματωμένο δέκτη Roger/FM (εφόσον χρησιμοποιείται). Εάν υποστεί ζημιά κάποιους από αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας, λόγω εφαρμογής υπερβολικής δύναμης ή χρήσης μη

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

κατάλληλου εργαλείου, πρέπει να δώσετε τη συσκευή για επισκευή ή αλλαγή στον ακοοπροσθετιστή σας.

- ⚠ Εάν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί ή εάν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος, καθώς και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας αυτιού, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή ή τον ιατρό σας.
- ⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης της θηλής στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.
- ⚠ Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή εν μέρει.
- ⚠ Το ακουστικό βαρηκοΐας περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση

κατάποσης από παιδιά. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση ή κατοικίδια ζώα.

Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

⚠ Εξωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μόνο εάν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IECXXXXX. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Phonak AG.

⚠ Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

■ Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) μακριά από το ενεργό εμφύτευμα. Εάν παρατηρούνται παρεμβολές, μη χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος.

Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.

■ Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση ασύρματων εξαρτημάτων με τα ακουστικά βαρηκοΐας που διαθέτετε. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας για λεπτομέρειες.

2.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ① Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μη βάζετε ποτέ τα ακουστικά βαρηκοΐας σε νερό. Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ① Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τις ειδικές ακουστικές του ιδιότητες.

-
- ① Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Για τις κατάλληλες μεθόδους αφύγρανσης, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.
 - ① Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε την μπαταριοθήκη ανοικτή, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλή, στεγνό και καθαρό χώρο.
 - ① Μη ρίχνετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
 - ① Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες για το ακουστικό βαρηκοΐας σας. Σε περίπτωση που μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, αντικαταστήστε την αμέσως με μια καινούρια για την αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Μπορείτε να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον ακοοπροσθετιστή σας.

2. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- ① Αφαιρείτε την μπαταρία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ① Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τα εκτός της αίθουσας/χώρου εξέτασης πριν υποβληθείτε σε:
 - Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σαρώσεις CT)
 - Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, εξετάσεις κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδίαΔεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά σας κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.). Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.

- ① Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Στις παρακάτω οδηγίες χρήσης περιγράφονται τέσσερα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας: Τα ακουστικά βαρηκοΐας **UltraPower (UP)**, **SuperPower (SP)**, **M13** και τεχνολογίας **Receiver-In-Canal (RIC)**.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να προσαρμοστούν με διάφορα εκμαγεία.

Στις παρακάτω σελίδες, χρησιμοποιήστε τα σχέδια με τις επισημάνσεις, για να εντοπίσετε το ακουστικό βαρηκοΐας και το εκμαγείο που χρησιμοποιείτε.


Στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύεται η μπαταρία που χρειάζεστε ανάλογα με το μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας που διαθέτετε.

Μοντέλο	Μέγεθος μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα (ένδειξη στη συσκευασία)	Κωδικός IEC	Κωδικός ANSI
UP	675 (μπλε)	PR44	7003ZD
SP	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD
M13	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD
RIC	13 (πορτοκαλί)	PR48	7000ZD

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα UltraPower και SuperPower


Επιλογή A: με κλασικό εκμαγείο

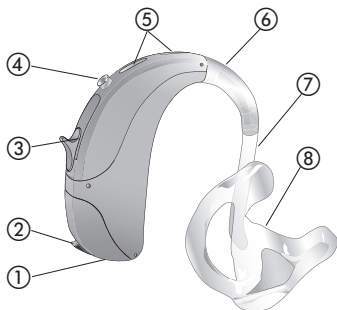

- ① Ένδειξη δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί=κόκκινο, αριστερό=μπλε)
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- ③ Ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Κουμπί προγραμμάτων
- ⑤ Είσοδοι μικροφώνου με προστατευτικό για τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες
- ⑥ Γωνία / έξοδος ήχου
- ⑦ Ακουστικός σωλήνας
- ⑧ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

Μοντέλα UltraPower και SuperPower

Επιλογή Β: Power SlimTube με κλασικό εκμαγείο

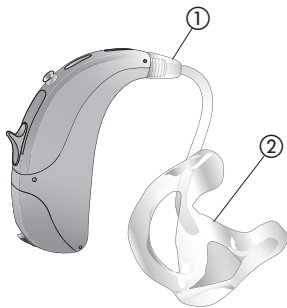


- ① Power SlimTube
- ② Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλο M13


Επιλογή A: με κλασικό εκμαγείο

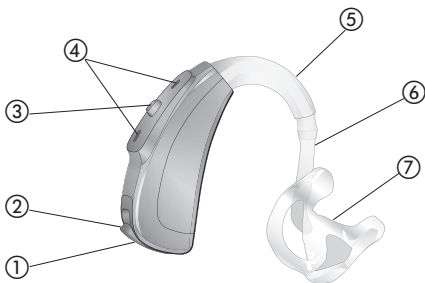


- ① Δείκτης δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί=κόκκινο, αριστερό=μπλε) στην μπαταριοθήκη
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Κουμπί προγραμμάτων ή ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Είσοδοι μικροφώνου
- ⑤ Γωνία/έξοδος ήχου
- ⑥ Ακουστικός σωλήνας
- ⑦ Κλασικό εκμαγείο (αποσπώμενο)

Μοντέλο M13

Επιλογή Β: με θηλή

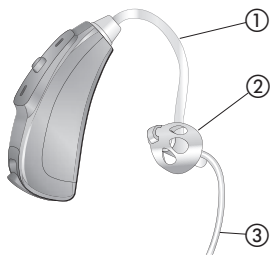

Επιλογή Γ: με SlimTip

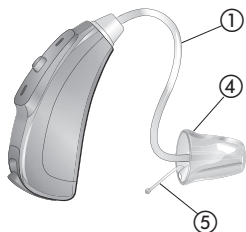

- ① Ακουστικός σωλήνας
- ② Εκμαγείο: Θηλή (αποσπώμενη)
- ③ Κορδόνι συγκράτησης
- ④ Εκμαγείο: SlimTip (αποσπώμενο)
- ⑤ Λαβή αφαίρεσης


3. Περιγραφή ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλο RIC

Επιλογή Α: με cShell



Επιλογή Β: με θηλή

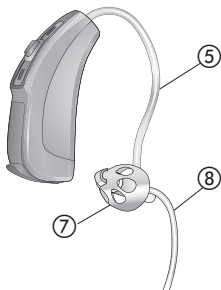

- ① Δείκτης δεξιού ή αριστερού αυτιού (δεξί=κόκκινο, αριστερό=μπλε) στην μπαταριοθήκη
- ② Μπαταριοθήκη με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ Κουμπί προγραμμάτων ή ρυθμιστής έντασης ήχου
- ④ Είσοδοι μικροφώνου
- ⑤ Καλώδιο εξωτερικού δέκτη
- ⑥ cShell
- ⑦ Θηλή (αποσπώμενη)
- ⑧ Κορδόνι συγκράτησης

4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο παρακάτω κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Ακολουθήστε τα βήματα αυτά προσεκτικά. Στα σχήματα, τα εξαρτήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κάθε βήμα υποδεικνύονται με πράσινο χρώμα.


Βήμα 1. Εξοικείωση με το ακουστικό βαρηκοΐας σας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας και δοκιμάστε τα χειριστήριά του. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και θα τα χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα αργότερα, όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Μοντέλα UltraPower και SuperPower

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω (Εικ. 1α).

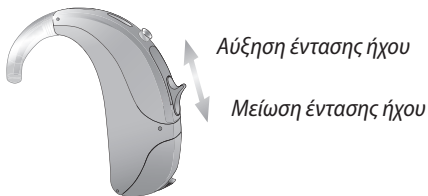

Εικ. 1α

Για να αλλάξετε ένα ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται (Εικ. 1β).




Εικ. 1β

Μοντέλα M13 και RIC

Ο ακοοπροσθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας (Εικ. 1γ).

Μείωση
έντασης
ήχου

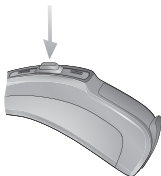

Αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας

Αύξηση
έντασης
ήχου




Δεξί ακουστικό βαρηκοΐας

Εικ. 1γ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας


Για να αλλάξετε ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί που απεικονίζεται (Εικ. 1δ).

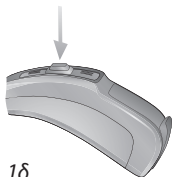

Εικ. 1δ

Βήμα 2. Προετοιμασία μπαταρίας

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την καινούρια μπαταρία (Εικ. 2). Περιμένετε δύο λεπτά πριν από την τοποθέτηση για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία.

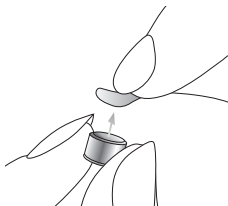


Εικ. 2

Βήμα 3. Τοποθέτηση μπαταρίας


Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο χέρι σας (Εικ. 3α/3γ) και ανοίξτε το καπάκι της μπαταριοθήκης. Τοποθετήστε την μπαταρία με τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 3β/3δ).

Μοντέλα UP και SP

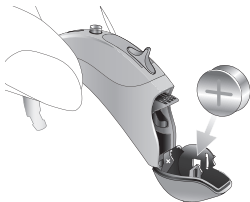

Εικ. 3α

Μοντέλα M13 και RIC

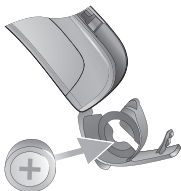

Εικ. 3γ



Εικ. 3β




Εικ. 3δ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 4. Ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας


Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 4α/β).

Μοντέλα UP και SP

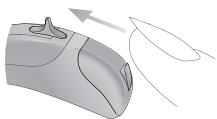

Εικ. 4α

Μοντέλα M13 και RIC

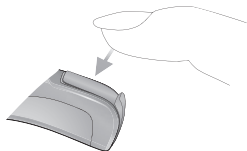

Εικ. 4β

- ⓘ **Ανοίξτε και κλείστε απαλά και προσεκτικά την μπαταριοθήκη.**
- ⓘ **Ελέγξτε εάν υπάρχει αντίσταση κατά το κλείσιμο της μπαταριοθήκης. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση και κατεύθυνση. Εάν η μπαταρία τοποθετηθεί με εσφαλμένο τρόπο, το ακουστικό βαρηκοΐας δεν θα λειτουργεί και η μπαταριοθήκη μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι πλέον ενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστούν έως και 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Όταν φορέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ενεργοποίησης.

Βήμα 5. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας. Οι οδηγίες ισχύουν για τα ακουστικά βαρηκοΐας **UltraPower**, **SuperPower**, **M13** και **RIC**.

Ο τρόπος τοποθέτησης του ακουστικού βαρηκοΐας εξαρτάται από τον τύπο του εκμαγείου.

- ① **Κάθε ακουστικό βαρηκοΐας προγραμματίζεται ξεχωριστά για το δεξί ή το αριστερό αυτί. Αρχικά, εντοπίστε το δεξί και το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας, ώστε να το τοποθετήσετε στο σωστό αυτί.**

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 5.1 Εντοπισμός των ακουστικών βαρηκοΐας για το δεξί και το αριστερό αυτί

Χρωματική ένδειξη:

δεξί = κόκκινο


αριστερό = μπλε

Μοντέλα UP και SP



Εικ. 5α

Μοντέλα M13 και RIC

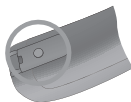


Εικ. 5β

Βήμα 5.2 Τοποθέτηση μοντέλου UltraPower ή SuperPower ή M13 με κλασικό εκμαγείο

Πριν τοποθετήσετε το εκμαγείο, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του βρίσκεται στη σωστή θέση, πάνω από το άγκιστρο του ακουστικού βαρηκοΐας. Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε το εκμαγείο για το δεξί αυτί (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας, βλ. βήμα 5.1) ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη.

Κρατήστε το εκμαγείο κοντά στο αυτί σας. Τοποθετήστε το τμήμα ακουστικού πόρου του εκμαγείου μέσα στον ακουστικό σας πόρο (βλ. τμήμα εντός κύκλου με πράσινο χρώμα, (Εικ. 5γ)). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας (Εικ. 5δ). Τοποθετήστε το άνω τμήμα του εκμαγείου στο άνω τμήμα της κοιλότητας του αυτιού σας (Εικ. 5ε).

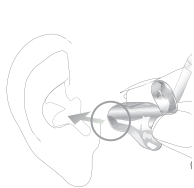

Εικ. 5γ



Εικ. 5δ



Εικ. 5ε

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε το εκμαγείο μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Ελέγξτε την εφαρμογή ψηλαφώντας την κοιλότητα του αυτιού. Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να αισθανθείτε κατά την ψηλάφηση το περίγραμμα της κοιλότητας του αυτιού και όχι του ακουστικού βαρηκοΐας (Εικ. 5στ). Στην αρχή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν καθρέφτη για τον έλεγχο αυτό.



Εικ. 5στ

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).

Βήμα 5.3 Τοποθέτηση μοντέλου UltraPower, SuperPower ή M13 με Power SlimTube με κλασικό εκμαγείο


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 5.2, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη.

Βήμα 5.4 Τοποθέτηση μοντέλου RIC με cShell

Με το δεξί σας χέρι, τοποθετήστε το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας (κόκκινη ένδειξη στο ακουστικό βαρηκοΐας, βλ. βήμα 5.1) πίσω από το δεξί αυτί (Εικ. 5ζ). Τοποθετήστε τον ακουστικό σωλήνα ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Εισαγάγετε το cShell βαθιά μέσα στον ακουστικό πόρο, ώστε ο ακουστικός σωλήνας να βρίσκεται σε επίπεδη θέση στο αυτί σας (Εικ. 5η).



Εικ. 5ζ

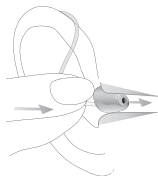

Εικ. 5η


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το ακουστικό βαρηκοΐας, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού σας προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ο ακουστικός πόρος ανοίγει λίγο περισσότερο και μπορείτε να περιστρέψετε τη θηλή μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Το δεξί ακουστικό βαρηκοΐας έχει πλέον τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας με τον ίδιο τρόπο (μπλε ένδειξη, βλ. βήμα 5.1).

Βήμα 5.5 Τοποθέτηση μοντέλου RIC με θηλή

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 5.4, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη. Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει κορδόνι συγκράτησης, τοποθετήστε το με πίεση στην κοιλότητα του αυτιού, ώστε η θηλή να συγκρατείται στον ακουστικό πόρο (Εικ. 5θ).

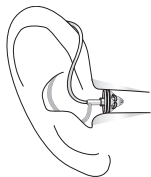


Εικ. 5θ

Βήμα 6. Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί

Βήμα 6.1 Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί σε μοντέλο UltraPower ή SuperPower

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα πάνω. Για να τη μειώσετε, πιέστε το ρυθμιστή έντασης ήχου προς τα κάτω με το δείκτη σας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6α).

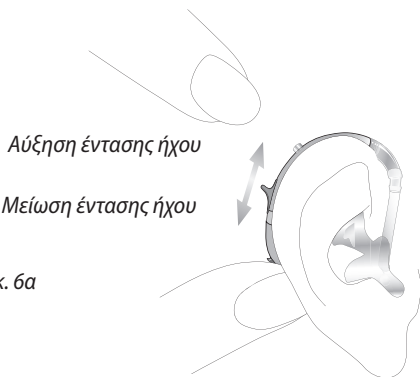


Εικ. 6α

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 6.2 Προσαρμογή του ρυθμιστή έντασης ήχου πίσω από το αυτί σε μοντέλο M13 ή RIC

Ο ακοοπροσθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί πίεσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων.


Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο δεξί ακουστικό βαρηκοΐας. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί στο αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας. Στηρίξτε ελαφρά το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρά σας (Εικ. 6β).

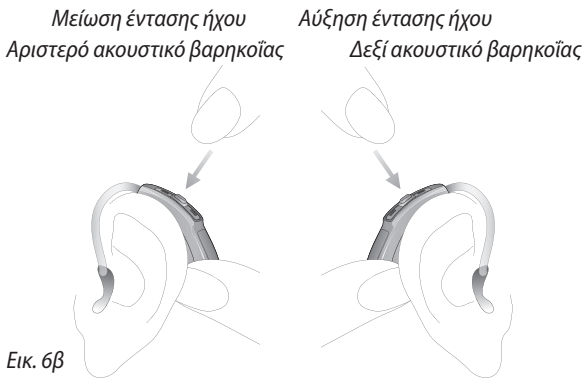

Βήμα 7. Επιλογή του ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί

Βήμα 7.1 Επιλογή ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί σε μοντέλο UltraPower ή SuperPower

Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται (Εικ. 7α).

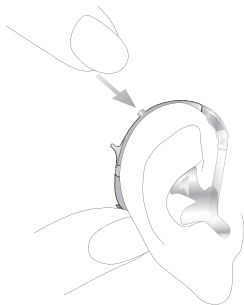

Εικ. 7α

Εάν το πατήσετε ξανά, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από ένα σήμα.


Ο τόνος σήματος θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας και το έχετε τοποθετήσει σωστά πίσω από το αυτί.

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 7.2 Επιλογή ακουστικού προγράμματος πίσω από το αυτί σε μοντέλο M13 ή RIC

Ο ακοοπροσθετιστής σας μπορεί να διαμορφώσει το κουμπί (πίεσης) του ακουστικού βαρηκοΐας σας είτε ως ρυθμιστή έντασης ήχου είτε ως επιλογή προγραμμάτων.

Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ακουστικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί προγραμμάτων που απεικονίζεται (Εικ. 7β).

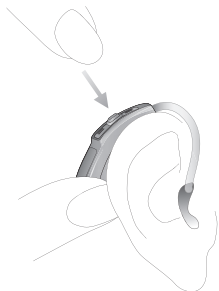


Εικ. 7β

Εάν το πατήσετε ξανά, θα μεταβείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Η αλλαγή προγράμματος υποδεικνύεται από ένα σήμα. Ο τόνος σήματος θα ακουστεί μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το ακουστικό βαρηκοΐας και το έχετε τοποθετήσει σωστά πίσω από το αυτί.

Βήμα 8. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας


Βήμα 8.1 Αφαίρεση μοντέλου UltraPower, SuperPower ή M13 με κλασικό εκμαγείο

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί, ανασηκώστε το πάνω από το άνω τμήμα του αυτιού σας και, στη συνέχεια, αφήστε το προσεκτικά (Εικ. 8α).

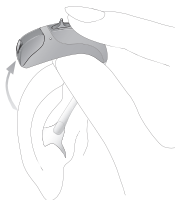

Εικ. 8α

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας για να κρατήσετε το εκμαγείο και αφαιρέσετε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8β). Μην τραβάτε από το σωλήνα για να αφαιρέσετε το εκμαγείο.

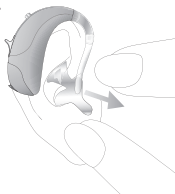

Εικ. 8β


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 8.2 Αφαίρεση μοντέλου UltraPower, SuperPower ή M13 με Power SlimTube με κλασικό εκμαγείο

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 8.1, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη.

Βήμα 8.3 Αφαίρεση μοντέλου RIC με cShell

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας από τον ακουστικό σωλήνα και αφαιρέστε το προσεκτικά από το αυτί σας (Εικ. 8γ).

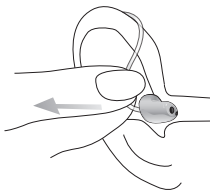

Εικ. 8γ

Βήμα 8.4 Αφαίρεση μοντέλου RIC με θηλή


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 8.3, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη.

⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Στην απίθανη περίπτωση ενσφήνωσης της θηλής στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

Βήμα 9. Απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας ανοίγοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 9α/9β).

Μοντέλα UP και SP

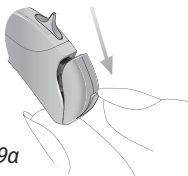

Εικ. 9α

Μοντέλα M13 και RIC

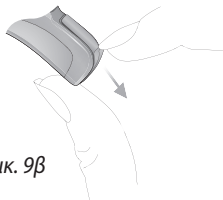

Εικ. 9β

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 10. Αλλαγή της μπαταρίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας σας εκπέμπει διπλό χαρακτηριστικό ήχο, για να υποδείξει ότι θα χρειαστεί σύντομα να αλλάξετε την μπαταρία. Συνήθως έχετε στη διάθεσή σας έως 30 λεπτά για να αλλάξετε την μπαταρία. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός μπορεί να ποικίλλει και να είναι σημαντικά συντομότερος. Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας μια εφεδρική μπαταρία.


- ⓘ **Για να υπολογίσετε τη μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε να καταγράψετε το χρόνο μεταξύ της έναρξης χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας και της ενεργοποίησης των ηχητικών σημάτων που υποδεικνύουν το τέλος της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.**

Βήμα 11. Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας UltraPower ή SuperPower με μπαταριοθήκη ασφαλείας


Στα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας **UltraPower** και **SuperPower** μπορεί να τοποθετηθεί μπαταριοθήκη ασφαλείας, εάν απαιτείται, για λόγους προστασίας.

Ανοίξτε την μπαταριοθήκη τοποθετώντας τη μύτη ενός στυλό μέσα στην εγκοπή που απεικονίζεται (Εικ. 11α). Ανασηκώστε προσεκτικά την ασφάλεια προς τα πάνω (Εικ. 11β). Μπορείτε πλέον να ανοίξετε την μπαταριοθήκη.

- ⓘ **Μην ανασηκώνετε την ασφάλεια κατά περισσότερες από 90°.**

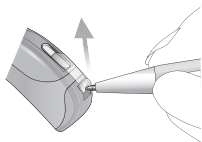


Εικ. 11α

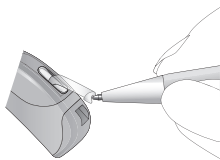

Εικ. 11β


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Πιάστε την μπαταριοθήκη με τον αντίχειρα και το δείκτη σας και τραβήξτε για να την ανοίξετε (Εικ. 11γ).

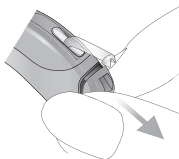

Εικ. 11γ

Τραβήξτε τη λευκή γλωττίδα με το νύχι σας (Εικ. 11δ) και πιέστε την προς τα πάνω (Εικ. 11ε). Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί ή τοποθετηθεί μόνο όταν η γλωττίδα είναι στην επάνω θέση (Εικ. 11ε).

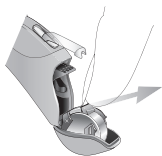


Εικ. 11δ



Εικ. 11ε

Μπορείτε πλέον να αντικαταστήσετε την παλιά μπαταρία με μια νέα (Εικ. 11στ).

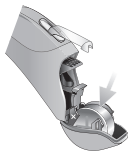


Εικ. 11στ

4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Πιέστε τη λευκή γλωττίδα προς τα κάτω, πάνω από την μπαταρία, (Εικ. 11ζ) ώστε να εφαρμόσει καλά πάνω της. Ασφαλίστε την μπαταρία ασκώντας πίεση στη λευκή γλωττίδα προς το ακουστικό βαρηκοΐας με το δάκτυλό σας (Εικ. 11η). Πριν κλείσετε την μπαταριοθήκη, βεβαιωθείτε ότι η λευκή γλωττίδα βρίσκεται στη σωστή θέση και η μπαταρία έχει ασφαλίσει.




Εικ. 11ζ

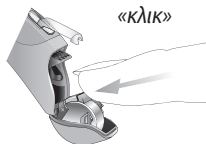


Εικ. 11η

Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας κλείνοντας την μπαταριοθήκη (Εικ. 11θ).

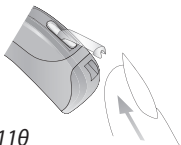


Εικ. 11θ

Ασφαλίστε την μπαταριοθήκη πιέζοντας την ασφάλεια πάνω της (Εικ. 11i) έως ότου ασφαλίσει στη θέση της (Εικ. 11ia). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταριοθήκη έχει πλέον ασφαλίσει.

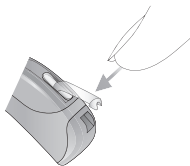

Εικ. 11i

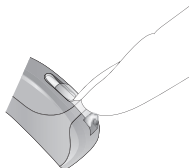


Εικ. 11ia


4. Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

Βήμα 12. Αλλαγή της μπαταρίας σε ακουστικό βαρηκοΐας M13 με μπαταριοθήκη ασφαλείας

Στο ακουστικό βαρηκοΐας **M13** μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά μπαταριοθήκη ασφαλείας, εάν απαιτείται, για λόγους προστασίας. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απασφαλίσετε την μπαταριοθήκη. Τοποθετήστε το παρεχόμενο εργαλείο για καπάκι μπαταριοθήκης μέσα στην εγκοπή που απεικονίζεται (Εικ. 12α). Σπρώξτε τη μπαταριοθήκη προς τα κάτω μέχρι να ανοίξει (Εικ. 12β).

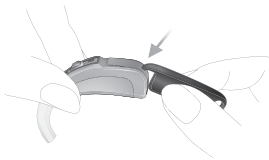


Εικ. 12α

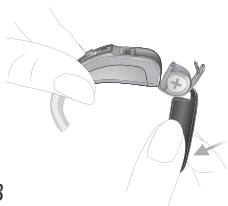


Εικ. 12β


Σπρώξτε την μπαταρία έξω από την μπαταριοθήκη με το εργαλείο για καπάκι μπαταριοθήκης (Εικ. 12γ). Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο + της μπαταρίας να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (Εικ. 12δ). Πριν κλείσετε την μπαταριοθήκη, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία βρίσκεται στη θέση της και κάτω από τη λευκή πλαστική γλωττίδα (Εικ. 12ε).

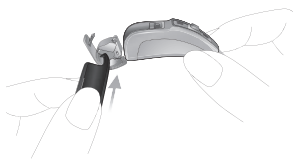


Εικ. 12γ

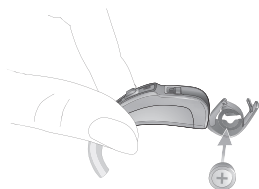

Εικ. 12δ

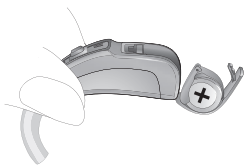

Εικ. 12ε

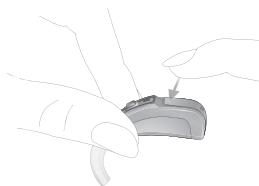

Εικ. 12στ

Κλείστε σωστά την μπαταριοθήκη και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να ανοίξει με το χέρι (Εικ. 12στ).

5. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες:

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, πρέπει να αφαιρέσετε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας σας, αφήνετε την μπαταριοθήκη ανοικτή, ώστε να εξατμίζεται τυχόν υγρασία. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλή, στεγνό και καθαρό χώρο.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το καπάκι της μπαταριοθήκης είναι τελείως κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνώσει ξένα σώματα, όπως τρίχες, στο καπάκι της μπαταριοθήκης κατά το κλείσιμό του.
 - Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας καθαρίζεται και στεγνώνει.
 - Το ακουστικό βαρηκοΐας χρησιμοποιείται και συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- ⓘ Ανθεκτικά στο νερό είναι επίσης και τα ακουστικά βαρηκοΐας με ενσωματωμένο δέκτη Roger/FM βάσει σχεδιασμού ή μπαταριοθήκη ασφαλείας.
- ⓘ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτη Roger/FM γενικής χρήσης δεν είναι ανθεκτικά στο νερό.

5. Φροντίδα και συντήρηση

- ① Σε περίπτωση χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας κοντά σε νερό ενδέχεται να περιοριστεί η ροή αέρα στις μπαταρίες και να πάψει να λειτουργεί. Εάν το ακουστικό βαρηκοΐας πάψει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στο κεφάλαιο 6.
- ① Μην εμβαπτίζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό ή άλλα υγρά.

Καθημερινά

Ελέγχετε εάν υπάρχουν εναποθέσεις κυψελίδας αυτιού και υγρασίας στο εκμαγείο (θηλή ή cShell) και στο σωλήνα. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ.λπ., για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα των εξαρτημάτων αυτών με νερό, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμονής του στο σωλήνα. Εάν απαιτείται εντατικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Εβδομαδιαία

Καθαρίζετε το εκμαγείο (θηλή ή cShell) με μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης ή πιο ενδελεχή καθαρισμό, απευθυνθείτε στον ακοοπροσθετιστή σας.

Μηνιαία

Ελέγχετε εάν ο ακουστικός σωλήνας έχει αποχρωματιστεί, σκληρύνει ή ραγίσει. Εάν διαπιστωθούν αλλαγές αυτού του τύπου, ο ακουστικός σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος από τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρότερης έντασης από ό,τι συνήθως / δεν λαμβάνεται ήχος από τα ακουστικά

Αρχικά, ελέγξτε εάν μπορείτε να ρυθμίσετε και να αυξήσετε την ένταση του ήχου με το ρυθμιστή έντασης ήχου.

Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο εκμαγείο και καθαρίστε τα εξαρτήματα, εάν απαιτείται. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί και εάν εφαρμόζει σωστά. Προσαρμόστε τη θέση της, εάν απαιτείται. Εάν δεν βελτιωθεί ο ήχος, αλλάξτε την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

Το ακουστικό βαρηκοΐας παύει να λειτουργεί μετά από επαφή με νερό

Στεγνώστε τα ακουστικά με ένα μαλακό ύφασμα ή χαρτί. Ανοίξτε την μπαταριοθήκη, αφήστε το ακουστικό βαρηκοΐας να στεγνώσει και αντικαταστήστε την μπαταρία. Εάν έχει παραμείνει νερό στον ακουστικό σωλήνα, αφαιρέστε τον από το ακουστικό βαρηκοΐας, κτυπήστε τον ελαφρά για να απομακρύνετε το νερό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά στο ακουστικό βαρηκοΐας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

Η μπαταρία αποφορτίζεται υπερβολικά γρήγορα

Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία και σημειώστε τη διάρκεια της με ακρίβεια. Ενημερώστε σχετικά τον ακοοπροσθετιστή σας για υποστήριξη και συμβουλές.

Τριγμοί ή βόμβοι

Ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας αυτιού στον ακουστικό σωλήνα και στο εκμαγείο. Ελέγξτε εάν έχει υποστεί ζημιά ο ακουστικός σωλήνας (αποχρωματισμός, σκλήρυνση ή ρωγμές) και επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας για αντικατάσταση, εάν απαιτείται.

Συριγμοί

Ελέγξτε εάν το εκμαγείο έχει τοποθετηθεί σωστά και εάν εφαρμόζει σταθερά. Εάν το εκμαγείο έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλά το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας.

Πόνος ή φλεγμονή στο αυτί

Αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον ακοοπροσθετιστή σας. Εάν το πρόβλημα είναι σοβαρό, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

7. Περιγραφή ασύρματων εξαρτημάτων

Η Rhonak παρέχει μια σειρά ασύρματων εξαρτημάτων που επεκτείνουν τις δυνατότητες των ακουστικών βαρηκοΐας σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως όταν βλέπετε τηλεόραση, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο και όταν επικοινωνείτε από απόσταση σε θορυβώδες περιβάλλον.

7.1 Σύνδεση σε πηγές ήχου και τηλεχειρισμός

Η σύνδεση με πηγή ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, τηλεόραση ή κινητό τηλέφωνο, είναι δυνατή μέσω του ασύρματου εξαρτήματος ροής δεδομένων ήχου.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ασύρματου τηλεχειρισμού των ακουστικών σας.



* Οι πηγές ήχου μπορούν να συνδεθούν μέσω Bluetooth® ή καλωδίου στο ασύρματο εξάρτημα ροής δεδομένων ήχου.

Η ονομασία Bluetooth® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.


7. Περιγραφή ασύρματων εξαρτημάτων

7.2 Επικοινωνία από απόσταση σε θορυβώδες περιβάλλον

Τα εξαρτήματα Roger/FM διευκολύνουν την επικοινωνία από απόσταση σε θορυβώδες περιβάλλον αποστέλλοντας ασύρματα τη φωνή του ομιλητή απευθείας στα ακουστικά βαρηκοΐας. Τα συστήματα Roger/FM περιλαμβάνουν μικρόφωνο και δέκτη. Ορισμένα μικρόφωνα Roger/FM υποστηρίζουν επίσης είσοδο από πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

Μικρόφωνο: φοριέται ή τοποθετείται κοντά στον ομιλητή, ή συνδέεται στην πηγή ήχου και μεταδίδει τον ήχο απευθείας στο δέκτη σας, χωρίς ενοχλητικούς περιβαλλοντικούς ήχους.

Δέκτης: προσαρτάται στα ακουστικά βαρηκοΐας και φοριέται πίσω από το αυτί ή στο σώμα σας, με κορδόνι για το λαιμό.

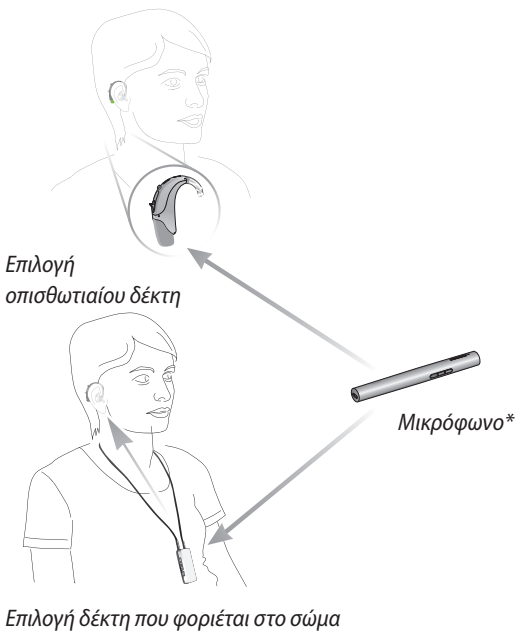

* Ορισμένα μικρόφωνα Roger/FM υποστηρίζουν επίσης είσοδο από πηγές ήχου μέσω Bluetooth® ή καλωδίου.

7. Ασύρματα εξαρτήματα και συστήματα FM

7.2.1 Περιγραφή συστήματος Roger/FM


Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται δύο μοντέλα δέκτη:

- Ενσωματωμένος δέκτης βάσει σχεδιασμού
- Διάταξη υποδοχής ήχου με δέκτη γενικής χρήσης


Στις παρακάτω σελίδες, χρησιμοποιήστε τις εικόνες για να προσδιορίσετε το δέκτη που διαθέτετε.

7.2.2 Ενσωματωμένος δέκτης βάσει σχεδιασμού

Μοντέλα UP και SP

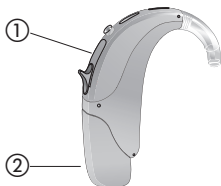

Μοντέλα M13 και RIC

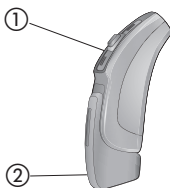

- ① Ακουστικό βαρηκοΐας
- ② Ενσωματωμένος δέκτης βάσει σχεδιασμού

Με προσαρτημένο τον ενσωματωμένο δέκτη βάσει σχεδιασμού, το ακουστικό βαρηκοΐας παρέχει τις ίδιες λειτουργίες και χρήσεις που παρέχονται και χωρίς το δέκτη (βλ. κεφάλαιο 4).


- ⓘ **Ο ακοοπροσθετιστής έχει προετοιμάσει τα ακουστικά βαρηκοΐας σας για χρήση με τον ενσωματωμένο δέκτη βάσει σχεδιασμού. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου δέκτη βάσει σχεδιασμού.**

Το Phonak Sky Q με ενσωματωμένο δέκτη βάσει σχεδιασμού είναι ανθεκτικό στο νερό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της ανθεκτικότητας στο νερό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.


7. Ασύρματα εξαρτήματα και συστήματα FM

7.2.3 Διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτης γενικής χρήσης

Μοντέλα UP και SP

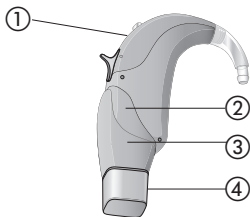

Μοντέλα M13 και RIC

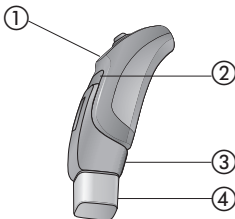

- ① Ακουστικό βαρηκοΐας
- ② Μπαταριοθήκη
- ③ Διάταξη υποδοχής ήχου (αφαιρούμενο εξάρτημα)
- ④ Δέκτης γενικής χρήσης (αφαιρούμενο εξάρτημα)


Με τη διάταξη υποδοχής ήχου και το δέκτη γενικής χρήσης συνδεδεμένο, το ακουστικό βαρηκοΐας παρέχει τις ίδιες λειτουργίες και χρηστικότητα όπως και χωρίς το δέκτη (βλ. κεφάλαιο 4).

-
- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας με διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτη γενικής χρήσης δεν είναι ανθεκτικά στο νερό.

Ο ακοοπροσθετιστής έχει προετοιμάσει τα ακουστικά βαρηκοΐας σας για χρήση με διάταξη υποδοχής ήχου και δέκτη γενικής χρήσης. Στις εικόνες 7.1 έως 7.5 απεικονίζονται τα μοντέλα **UltraPower** και **SuperPower**. Ακολουθείτε τις οδηγίες αυτές και για τα μοντέλα **M13** και **RIC**, καθώς η διαδικασία είναι ίδια.

Βήμα 1. Προσάρτηση της διάταξης υποδοχής ήχου στο ακουστικό βαρηκοΐας


Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του ενός χεριού και τη διάταξη υποδοχής ήχου με το άλλο χέρι. Πιέστε τη διάταξη υποδοχής ήχου προς τη βάση του ακουστικού βαρηκοΐας. Αντιστοιχίστε τις εγκοπές του ακουστικού βαρηκοΐας με τις υποδοχές της διάταξης υποδοχής ήχου (Εικ. 7.1).

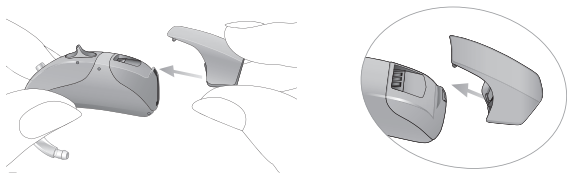

Εικ. 7.1


7. Ασύρματα εξαρτήματα και συστήματα FM

Πιέστε το ακουστικό βαρηκοΐας προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (Εικ. 7.2). Η διάταξη υποδοχής ήχου έχει προσαρτηθεί σωστά στο ακουστικό βαρηκοΐας. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να προσαρτήσετε το δέκτη γενικής χρήσης.

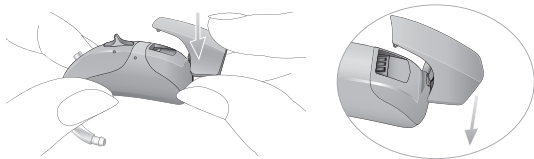

Βήμα 2. Σύνδεση του δέκτη γενικής χρήσης στην υποδοχή γενικής χρήσης


Πιέστε τις τρεις ακίδες του δέκτη γενικής χρήσης προς τις τρεις υποδοχές της διάταξης υποδοχής ήχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει το δέκτη γενικής χρήσης έτσι ώστε η μεγαλύτερη ακίδα να εισέλθει στη μεγαλύτερη υποδοχή. Ο δέκτης γενικής χρήσης έχει τοποθετηθεί σωστά στη διάταξη υποδοχής ήχου μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (Εικ. 7.3).

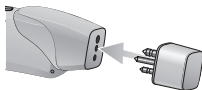

Εικ. 7.3


Βήμα 3. Αφαίρεση της διάταξης υποδοχής ήχου από το ακουστικό βαρηκοΐας

Κρατήστε το ακουστικό βαρηκοΐας με τον αντίχειρα και το δείκτη σας. Μετακινήστε προς τα πίσω το σύστημα ασφάλισης της διάταξης υποδοχής ήχου (Εικ. 7.4). Ταυτόχρονα, μετακινή-

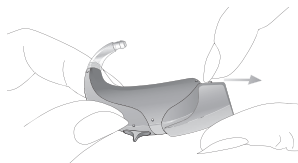

Εικ. 7.4

στε το ακουστικό βαρηκοΐας προς τα πάνω με το άλλο χέρι (Εικ. 7.5). Η διάταξη υποδοχής ήχου έχει πλέον αφαιρεθεί από το ακουστικό βαρηκοΐας.

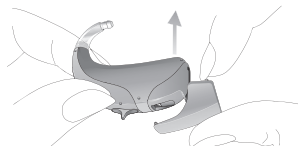

Εικ. 7.5

- ⓘ Για αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος Roger/FM όταν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, η Phonak συνιστά να αφήνετε το δέκτη γενικής χρήσης προσαρτημένο όταν δεν χρησιμοποιείται.

8. Σέρβις και εγγύηση

8.1 Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακο-
οπροσθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το ακουστικό
βαρηκοΐας που διαθέτετε.

8.2 Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με
ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμέ-
νη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττω-
ματικά υλικά στο ίδιο το ακουστικό, αλλά όχι στα εξαρτήματα
όπως μπαταρίες, σωλήνες, εκμαγεία, εξωτερικοί δέκτες. Η εγγύ-
ηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά
σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με
την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

8.3 Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν σέρβις που εκτελείται από τον ακοοπροσθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακός αριθμός
(αριστερή πλευρά):

Σειριακός αριθμός
(δεξιά πλευρά):

Ημερομηνία αγοράς:

Εξουσιοδοτημένος ακοοπρο-
σθετιστής (σφραγίδα/υπογρα-
φή):

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης


Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Rhonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν της Rhonak πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ καθώς και της οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rhonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στη διεύθυνση www.rhonak.com (Rhonak worldwide locations (Αντιπροσωπείες της Rhonak σε ολόκληρο τον κόσμο)).

Αυστραλία:

Κωδικός αριθμός προμηθευτή

 N15398

Νέα Ζηλανδία:

Κωδικός αριθμός προμηθευτή

Z1285

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Μοντέλα UP και SP

Η.Π.Α.	FCC ID: KWC-WHSBTE1U
Καναδάς	IC: 2262A-WHSBTE1U

Μοντέλο RIC

Η.Π.Α.	FCC ID: KWC-WHSSAN1
Καναδάς	IC: 2262A-WHSSAN1

Μοντέλο M13

	KWC-WHSSANQ
	2262A-WHSSANQ

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Rhonak μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

9. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων / τηλεοράσεων για υποστήριξη.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Phonak AG επιβεβαιώνει ότι το παρόν προϊόν της Phonak –συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων– πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ, καθώς και της οδηγίας ΡΤΤΕ 1999/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.

10. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Ετικέτα συμμόρφωσης ΗΜΣ και ραδιοεπικοινωνιών, Αυστραλία.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Θερμοκρασία: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου
(-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ)



Υγρασία κατά τη μεταφορά: Έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%, εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 2.2.



Ατμοσφαιρική πίεση: 200 hPA έως 1500 hPA



Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροσθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.





Κατασκευαστής:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

για την Ελλάδα:

www.phonak-hellas.com

www.phonak.com

